


# 簡単な使い方 フォナック リモートマイク パッケージ

## 各部の名称

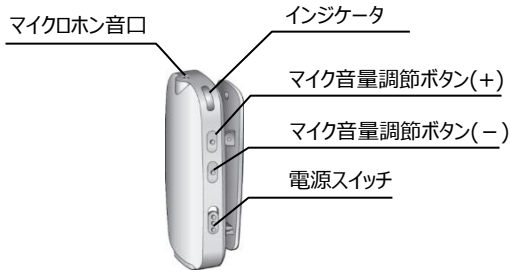

リモートマイク



コムパイロット

## 基本的な使い方

- ①. コムパイロットを身につけます。

補聴器をお使いの方の首に掛けてください。



- ②. コムパイロットの電源を ON にします。



- ③. リモートマイクの電源を ON にして、身につけます。



リモートマイクのマイクロホン音口と話し手の口元との距離は15cm以内になるよう、襟元に本体をつけます。




操作は、これだけ！ とっても簡単です。


## 接続できず、困ったら 再度、ペアリングしてください

リモートマイクとコムパイロットとをペアリングする場合は、以下の手順でペアリングしてください。

- ①. コムパイロットの接続ボタンと音量調節ボタン(+)を2秒間、長押ししてください。

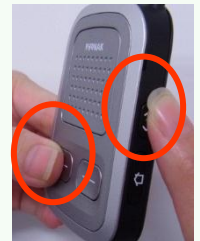

- ②. リモートマイクの電源を OFF の状態から、マイク音量調節ボタン(+)を押しながら、電源を ON にしてください。両機ともペアリング状態になりますので、しばらくそのままお待ちください。

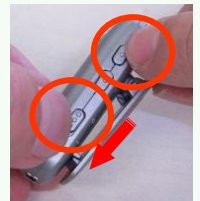

- ③. 青い点滅が点灯に変われば、ペアリング完了です！



## ワンポイントアドバイス

もし、音量変更をしたいときは？

全体の音を変更したい

コムパイロットで変更



話し手の声だけ変更したい

リモートマイクで変更

