

デジタルワイヤレス補聴援助システム Roger

線音源スピーカー

Roger デジマスター 7000/5000 取扱説明書

はじめに

このたびはフォナック社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Roger デジマスターは、一般的なスピーカーに比べ、遠方まで音が届くとともに、反響、残響が少ないという特徴を持つ線音源スピーカーで、専用のワイヤレスマイク(Roger inspiro)と一緒に使用します。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。

次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

Roger デジマスター本体の取り扱いについて

- **危険**
- ・分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
- ・濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所や取り扱いに注意してください。
- ・火のそばや直射日光の強いところ、炎天下の車内など高

温の場所で使用したり放置したりしないでください。機器の変形、故障、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

■ 警告

- ・強い衝撃を与えないでください。破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
- ・使用中や充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など今までと異なる症状がある際には、直ちに以下の作業を行ってください。そのまま使用すると発熱、破裂、発火の原因となります。
 1. 電源プラグをコンセントから抜く。
 2. Roger デジマスターの電源を切る。

■ 注意

- ・湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には置かないでください。

AC アダプターの取り扱いについて

■ 警告

- ・付属の専用 AC アダプターを使用してください。濡れた手で AC アダプターのコード、コンセントに触れないでください。感電の原因となります。
- ・風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ・長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。
- ・コンセントにつながれた状態で、充電用端子に手や指など体の一部に触れさせないでください。感電、傷害、故障の原因となります。
- ・AC アダプターをコンセントに差し込むときは金属類に触れさせないよう注意し、確実に差し込んでください。誤った場合、感電、ショート、火災の原因となります。指定の電源、電圧で使用してください。誤った場合、火災、故障の原因となります。
- ・電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災の原因となります。
- ・雷が鳴り出したら、Roger デジマスター本体、AC アダプターには触れないでください。落雷、感電の原因となります。
- ・充電中は AC アダプターを安定した場所に置いてください。また AC アダプターを布などで覆ったり、包んだりしないでください。

■ 注意

- ・AC アダプターをコンセントから抜く場合はコードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。感電、火災、故障の原因となります。

- ・AC アダプターのコードの上に重いものを載せないでください。感電、火災の原因となります。

■ その他の注意事項

本製品の修理はフォナック・ジャパンまたはフォナック・ジャパンの指定するサービスセンターのみで可能です。

1. 本体および付属品

Roger デジマスター本体

AC アダプター

スタンド

壁掛け用パーツ


取扱説明書 (本書)

デジマスター設置ガイド

保証書/国際保証書




2. 各部の名称

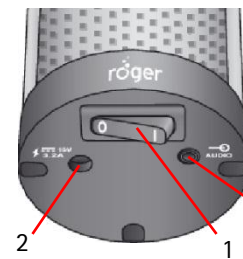


<底部>

1. 電源スイッチ
2. 電源端子
3. 外部入力端子 (3.5mm)

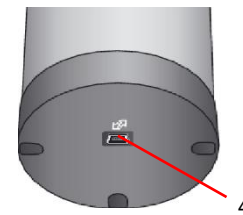

<上部>

4. USB 端子 (mini-B)

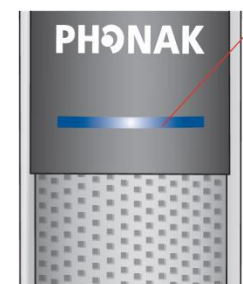

<前方上部>

5. インジケーター

3. Roger デジマスターの組み立て

Roger デジマスターは、スタンドと壁掛けの2通りの設置方法が選べます。付属のデジマスター設置ガイドを参考に組み立ててください。

4. ワイヤレスマイクロホンの準備

Roger デジマスターは専用のワイヤレスマイクロホン Roger inspiro と一緒に使用します。

Roger デジマスターを使用する前に、Roger inspiro とネットワークを組んでおきます。

5. ネットワークの組み方

Roger デジマスターの電源を入れます。

Roger inspiro の電源を入れます。

Roger デジマスターから10cm以内で Roger inspiro の右ソフトキーに表示される追加キーを押します。


ネットワークが組み合ると、Roger inspiro のディスプレイ画面にスピーカーのマーク (🔊) が表示されます。

<Rogerのみモード>

<Roger+FM モード>




※ Roger デジマスター7000 は Roger inspiro 1 台に対し、2 台までネットワークを組むことが可能です。

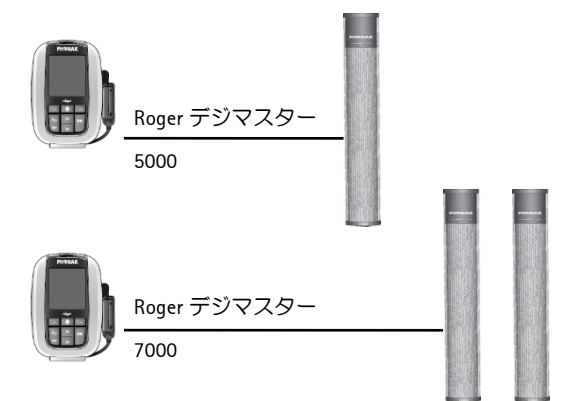


6. 音量調整

本製品は周囲の騒音レベルに合わせて自動音量調節機能が働きますが、Roger inspiro を使用してお好みの音量に微調整することも可能です。

1. Roger inspiro のメニュー画面から「SoundField」を選択します。

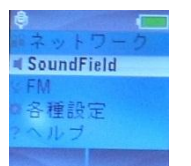

2. 音量調整を選択します。

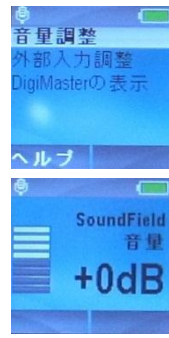

3. アップ/ダウンキーでお好みの音量に調節し OK キーで確定します。


7. 外部入力調整

本製品と外部入力機器とを使用する場合、Roger inspiro から音量の調節を行うことができます。メニュー画面から「SoundField」を選択し、続いて外部入力調整を選択します。Roger inspiro のアップ/ダウンキーを押してお好みの音量に設定してください。

8. インジケータ表示について

インジケータ表示の内容は以下の通りです。

電源オフ	 赤 (点灯)	電源がオフの状態です。
電源オン 動作中	 青 (点灯)	本製品と Roger inspiro の電源が入っており、正常に作動しています。
スタンバイ モード	 青 (点滅)	ネットワーク内に Roger inspiro が見つかりません。Roger inspiro の電源が入っているか、電波の届く範囲内 (10m 以内) にあるか確認してください。
ミュート	 緑 (点灯)	Roger inspiro がミュートになっています。マルチ・トーカー・ネットワーク使用時は親機の Roger inspiro の状態を確認してください。
ボリューム	 緑 (点滅) 赤 (ボリューム最大)	ボリュームの上げ下げを行っています。ボリュームが最大になると赤く点滅します。
ソフトウェア アップデート	 黄 (点滅)	ソフトウェアをアップデートしています。

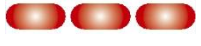異常	 赤 (点滅)	本製品の電源を切り、ACアダプタのプラグを抜いて10秒間放置してください。その後ACアダプタを接続し電源をもう一度入れて下さい。それでも解消しない場合はお求めの販売店にご相談ください。
----	--	--

9. その他

有効室内面積

Roger デジマスター7000 (2台)	最大約 300 m ²
Roger デジマスター7000 (1台)	最大約 150 m ²
Roger デジマスター5000 (1台)	最大約 100 m ²

使用可能距離

マイクロホン (Roger 送信機) / Roger デジマスター間	最大約 20m
マイクロホン (Roger 送信機) 間	最大約 20m

- ※ 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。室内で安定して使用することができる距離は約 15m です。
- ※ マイクロホン (Roger 送信機) から Roger デジマスターへ発する電波は、屋外や体育館などの大きな部屋で使用の際、マイクロホン (Roger 送信機) を装着する人の体が電波を遮り、マイクロホン (Roger 送信機) からの音が途切れることがあります。上記のような場所では、マイクロホン (Roger 送信機) が体の前面に来るように装着してください。

10. 保証期間とアフターサービス

保証について

日本国内における保証期間

日本国内における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より2年間です。無償修理の際、保証書が必要になりますので、製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

Local Warranty

Please ask the hearing care professional, where you purchased your hearing aid, about the terms of the local warranty.

日本国外における保証期間 (国際保証)

日本以外の国における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証対象はアクセサリパーツを除く機器本体となります。国際保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

当規定は上記の修理保証規定により交換・修理をお約束するものであり、法律上のおお客様の権益を制限するものではありません。

International Warranty

Phonak offers you a one year limited international warranty valid starting from the date of purchase. This limited warranty covers manufacturing and material defects in the hearing aid itself, but not accessories such as batteries, tubes, ear modules, external receivers. The warranty only comes into force if a proof of purchase is shown. The international warranty does not affect any legal rights that you might have under applicable national and legislation governing sale of consumer goods.

保証適用除外

お客様または第三者の誤った使用・過失・改造による故障および損傷に対しての修理に関しては、保証期間内であっても保証適用外となります。修理は、フォナックが指定するサービスセンターでのみ行ってください。また、専門家による調整やアフターケア等のサービスに対しても、保証対象ではありません。

Warranty Limitation

This warranty does not cover damage from improper handling or care, exposure to chemicals or undue stress. Damage caused by third parties or non-authorized service centers renders the warranty null and void. This warranty does not include any services performed by a hearing care professional in their office.

本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Memo

製造販売業

フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 5-2-4

レキシントン・プラザ西五反田

TEL 0120-06-4079 (お客様相談窓口)

FAX 0120-23-4080

www.phonak.jp